




Conversation Clear Plus

- EN Welcome
- DE Willkommen
- FR Bienvenue
- ES Bienvenidos
- PT Bem-vindo
- NL Welkom
- IT Benvenuto
- DA Velkommen
- SV Välkommen


Quick Guide | Kurzanleitung | Guide rapide | Instrucciones resumidas | Guia rápido | Beknopte handleiding | Guida rapida | Kort vejledning | Snabbguide

Model: ConCPlus1, ConCPlus1-R, ConCPlus1-L, ConCPlus1-C


1. Waking up and charging the rechargeable batteries | Akkus aufwecken und laden | Réveiller et charger les batteries | Despertar y cargar las pilas recargables | Ativar e carregar as pilhas recarregáveis | De accu's plaatsen en opladen | Attivazione e caricamento delle batterie ricaricabili | Vækning og opladning af batterier | Väcka och ladda batterierna

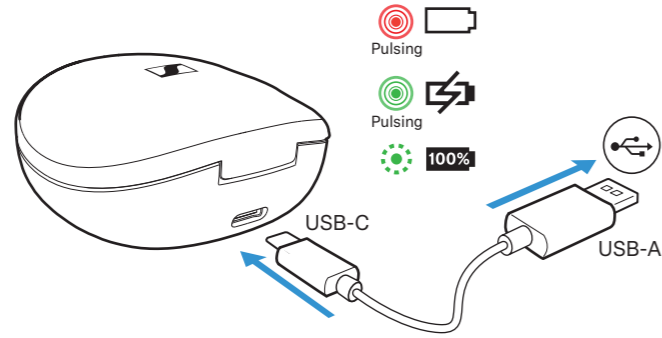


2. Starting the Bluetooth® pairing | Bluetooth®-Kopplung starten | Démarrer l'appairage Bluetooth® | Iniciar la sincronización Bluetooth® | Iniciar o emparelhamento Bluetooth® | Bluetooth®-koppeling starten | Avvio dell'accoppiamento Bluetooth® | Start af Bluetooth®-kobling | Starta Bluetooth®-parkoppling

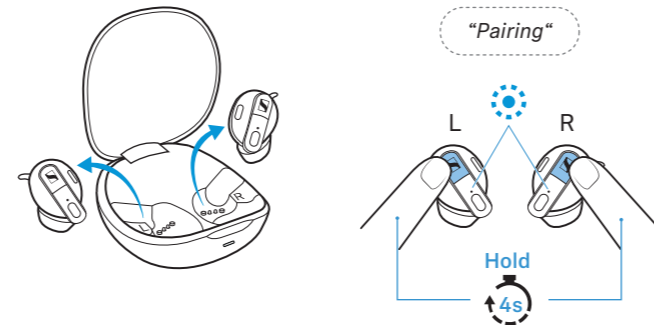

3. Establishing a connection | Verbindung herstellen | Établir une connexion | Establecer la conexión | Estabelecer a ligação | De verbinding tot stand brengen | Creazione di una connessione | Etablering af forbindelse | Upprätta en anslutning

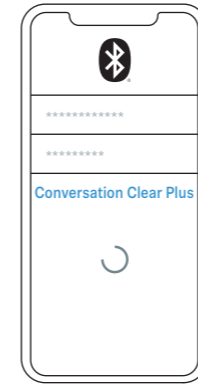

4. Selecting ear adapters and ear fins and inserting the earbuds into the ears | Ohradapter und Ohrfinnen wählen und Hörer in die Ohren einsetzen | Sélectionner les embouts d'oreille et les ailettes d'oreille et insérer les écouteurs dans les oreilles | Seleccionar los adaptadores para los oídos y las aletas y colocar los audífonos en los oídos | Escolher os adaptadores e alhetas auriculares e colocar os auscultadores nos ouvidos | Ooradapters en oorvinnen kiezen en oortelefoons in de oren inbrengen | Scelta dei gommini e delle alette auricolari e inserimento delle microcuffie nelle orecchie | Valg af øreadaptere og ørefinnet og isætning af øretelefoner i ørerne | Välja öronadaptrar och öronfenor och sätta in hörlurarna i öronen

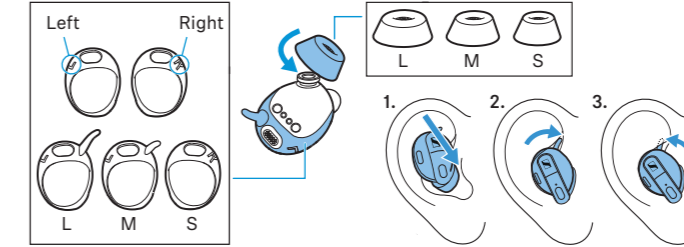

5. Downloading the app for customized settings of the earbuds | App herunterladen für individuelle Einstellungen der Ohrhörer | Télécharger l'appli pour les réglages personnalisés des écouteurs | Descargar la app para los ajustes individuales de los audífonos | Descarregar a app para definições individuais dos auriculares | App downloaden voor individuele instellingen van de oortelefoon | Download dell'app per impostazioni individuali delle microcuffie | Download af app til individuelle indstillinger af øretelefonerne | Ladda ner app för individuella inställningar av hörlurarna



www.sennheiser-hearing.com/conversation-clear-app

Instruction manuals and product support | Bedienungsanleitungen und Produktbetreuung | Notices d'emploi et support produit | Instrucciones de manejo y asistencia al producto | Manuais de instruções e assistência ao produto | Gebruiksaanwijzingen en product-support | Istruzioni per l'uso e assistenza sul prodotto | Betjeningsvejledninger og produktrådgivning | Bruksanvisningar och produktguide

www.sennheiser-hearing.com/conversation-clear-plus



Sonova Consumer Hearing GmbH
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser-hearing.com
029-1209-72/V1.00/2022-05

Controls (depending on active usage mode Relax, Communication or Stream) | Steuerungen (abhängig von den verwendeten Nutzungs-Modi Entspannen, Kommunizieren oder Streamen) | Commandes (selon le mode d'utilisation actif Détente, Communication ou Flux)

	Relax	Communication	Stream
		Left	Right
Short press 1x		Volume -	Volume +
Hold 2s		—	Communication Mode
Tap 2x		Voice assistant	Play

Controles (en función de los modos de uso utilizados Relajación, Comunicación o Streaming) | Controlos (dependente dos modos de utilização utilizados Relaxar, Comunicar ou Streaming) | Besturingen (afhankelijk van de gebruikte gebruiksmodi Ontspannen, Communiceer of Streamen)


	Relax	Communication	Stream
		Left	Right
Short press 1x		Volume -	Volume +
Hold 2s		Relax Mode	Clarity boost on/off
Tap 2x		Voice assistant	Play

ceren of Streamen) | Controlli (in base alle modalità di utilizzo Relax, Comunicazione o Streaming) | Styninger (afhængigt af de anvendte anvendelsesmodi afslapning, kommunikation eller streaming) | Styningar (utifrån aktuellt använda användningslägen Koppla av, Kommunizera eller Streama)


	Relax	Communication	Stream
		Left	Right
Short press 1x		Ambient balancing	Ambient balancing
Hold 2s		Relax Mode	Communication Mode
Tap 2x		Voice assistant	Play / Pause

	Phone calls								
Left or Right	<table border="1"> <tr> <td>Accept call</td> <td>Reject call</td> </tr> <tr> <td>Short press 1x or Tap 2x</td> <td>Hold 2s</td> </tr> <tr> <td>End call</td> <td>Ambient balancing</td> </tr> <tr> <td>Hold 2s or Tap 2x</td> <td>Short press 1x</td> </tr> </table>	Accept call	Reject call	Short press 1x or Tap 2x	Hold 2s	End call	Ambient balancing	Hold 2s or Tap 2x	Short press 1x
Accept call	Reject call								
Short press 1x or Tap 2x	Hold 2s								
End call	Ambient balancing								
Hold 2s or Tap 2x	Short press 1x								

Package contents | Lieferumfang | Contenu | Volumen de suministro | Material fornecido | Omvang levering | In dotazione | Leveringsomfang | Leveransomfattning

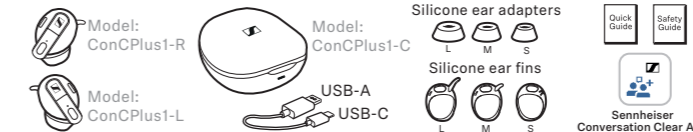

Charging with a USB power source or a wireless charger* | Laden mit einer USB-Stromquelle oder einem kabellosen Ladegerät* | Charger avec une source d'alimentation USB ou un chargeur sans fil* | Cargar con una fuente de corriente USB o con un cargador inalámbrico* | Carregar com uma fonte de corrente USB ou um carregador sem fios* | Opladen met een USB-stroombron of een draadloze oplader* | Caricamento con una fonte di energia USB o un caricabatterie wireless* | Opladning med en USB-strømkilde eller et trådløs oplader* | Laddning via en USB-strömkälla eller trådlös laddare*

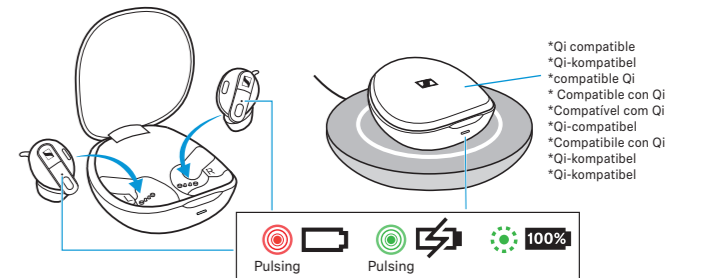

*Qi compatible
*Qi-kompatibel
*compatible Qi
*Compatible with Qi
*Qi-kompatibel
*Compatible with Qi
*Qi-kompatibel
*Qi-kompatibel



Conversation Clear Plus

FI Tervetuloa
 EL Καλώς ορίσατε
 PL Witamy
 TR Hoş geldiniz
 RU Добро пожаловать!
 JA よこそ
 KO 환영
 ID Selamat datang
 ZH-HANS 欢迎
 ZH-HANT 歡迎

Pikaohje | Σύντομες οδηγίες | Krótka instrukcja obsługi | Kisa Kälvuz |
 Краткая инструкция | クイックガイド | 빠른 안내서 | Panduan ringkas |
 快速指南 | 快速指南

Model: ConCPlus1, ConCPlus1-R, ConCPlus1-L, ConCPlus1-C


Käyttöohjeet ja tuoteneuvonta | Οδηγίες λειτουργίας και υποστήριξη
 προϊόντος | Instrukcje obsługi i pomoc produktowa | Kullanım kılavuzları ve
 ürün desteği | Инструкции по эксплуатации и уход за изделием | 取扱
 説明書と製品サポート | 사용 설명서 및 제품 지원 | Petunjuk penggunaan dan
 dukungan produk | 使用说明书和产品支持 | 使用說明書和產品支援

www.sennheiser-hearing.com/conversation-clear-plus




Sonova Consumer Hearing GmbH
 Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
 www.sennheiser-hearing.com
 029-1209-72/V1.00/2022-05


- 1. Akkujen herättäminen ja lataaminen | Επαναφορά και φόρτιση των μπαταριών | Uruchamianie i ładowanie akumulatorów | Pillerin uyandırılması ve şarj edilmesi | Пробуждение и зарядка аккумуляторов | 充電器を起動して充電する | 배터리 충전 및 웨이크업 | Aktifkan baterai dan isi dayanya | 喚醒電池并充电 | 喚醒電池並充電**

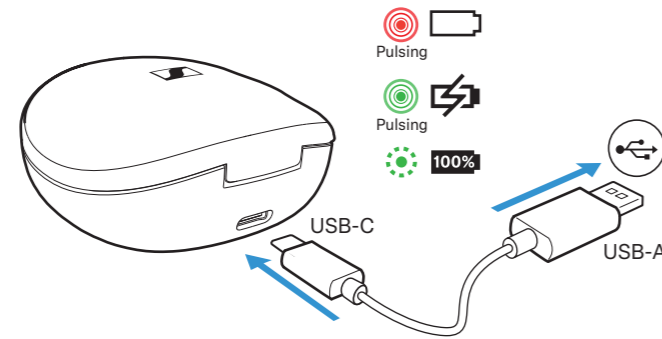


- 2. Bluetooth®-kytännän käynnistäminen | Έναρξη ζεύξης Bluetooth® | Rozpoczynanie parowania Bluetooth® | Bluetooth bağlantısının başlatılması | Установка соединения по Bluetooth® | Bluetooth®-ペアリングを開始する | 블루투스 페어링 시작 | Mulai penyandingan Bluetooth® | 开始Bluetooth®配对 | 開始Bluetooth®配對**

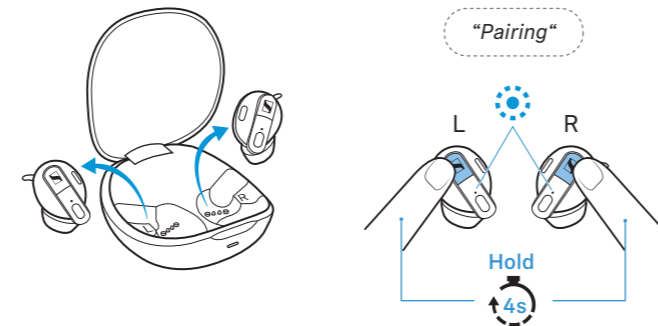

- 3. Yhteyden muodostaminen | Δημιουργία σύνδεσης | Nawiązywanie połączenia | Bağlantının kurulması | Установка соединения | 接続を確立する | 연결 구성 | Buat koneksi | 建立连接 | 建立连接**

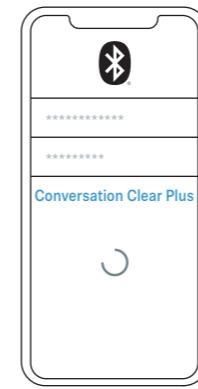

- 4. Korva-adapterien ja korvaevien valitseminen ja kuulokkeiden asettaminen korviin | Επιλογή μαξιλαριών αυτιού και πτερυγίων και τοποθέτηση των ακουστικών στα αυτιά | Wybór nakładki i wkładki dousznej i wkładanie słuchawek do uszu | Kulak adaptörleri ve kanatçıklarının seçilmesi, kulaklıkların kulaklara takılması | Выбор вкладыша и насадки. Вставка наушников | アダプターとイヤフィンを選択し、イヤフォンを耳に装着する | 이어 어댑터와 이어 핀을 선택하고 리시버를 귀에 삽입하십시오. | Memilih adaptor telinga serta sirip telinga, dan memasang headphone di telinga | 选择耳塞套和耳翼并将耳机放入耳道 | 選擇耳塞套和耳翼並將耳機放入耳道**

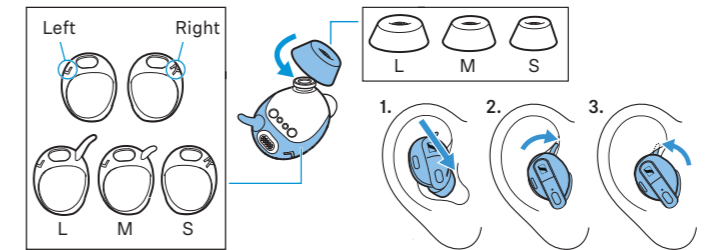

- 5. Sovelluksen lataaminen kuulokkeiden yksilöllisiä asetuksia varten | Λήψη εφαρμογής για εξατομικευμένες ρυθμίσεις των ακουστικών | Pobieranie aplikacji w celu dokonania indywidualnych ustawień słuchawek | Kulaklıkların özel ayarları için uygulamanın indirilmesi | Загрузка приложения для индивидуальных настроек |イヤフォンの個別設定のためのアプリをダウンロードする | 아이폰의 개별 설정을 위한 앱 다운로드 | Mengunduh aplikasi untuk pengaturan earphone masing-masing | 下载耳机的个性化设置应用程序 | 下载耳機的個人化設定應用程式**



www.sennheiser-hearing.com/conversation-clear-app

Ohjaukset (riippuen käytettävästä käyttötilasta rentoutuminen, kommunikointi tai striimaus) | Χειρισμοί (αναλόγως τη λειτουργία χρήσης που χρησιμοποιείτε, Χαλάρωση, Επικοινωνία ή Μετάδοση μέσω ροής) | Sterowanie (w zależności od używanego trybu: relaks,

	Relax	Communication	Stream
		Left	Right
Short press 1x		Volume -	Volume +
Hold 2s		—	Communication Mode
Tap 2x		Voice assistant	Play

komunikacja lub odtwarzanie strumieniowe) | Kontroller (kullanılan Rahatlama, İletişim veya Ses Akışı modlarına bağlı olarak) | Управление (с учетом режима работы, связи и потоковых данных) | 制御 (使用されるモード(リラククス、コミュニケーション、ストリーム)に応じて) |

	Relax	Communication	Stream
		Left	Right
Short press 1x		Volume -	Volume +
Hold 2s		Relax Mode	Clarity boost on/off
Tap 2x		Voice assistant	Play


제어(휴식, 전화, 스트리밍 등 각 사용 모드에 따라 바뀜) | Kontrol (tergantung pada mode penggunaan yang dipakai, rileks, komunikasi, atau streaming) | 控制 (取决于使用模式: 放松、通讯或流媒体)。 | 控制 (取決於使用模式: 放鬆、通訊或串流媒體)。

	Relax	Communication	Stream
		Left	Right
Short press 1x		Ambient balancing	Ambient balancing
Hold 2s		Relax Mode	Communication Mode
Tap 2x		Voice assistant	Play / Pause


Phone calls

	Accept call	Reject call
Left or Right	Short press 1x	Hold 2s
	or Tap 2x	
	End call	Ambient balancing
	Hold 2s	Short press 1x
	or Tap 2x	

Toimitussisältö | Περιεχόμενα συσκευασίας | Zakres dostawy | Teslimat kapsamı | Комплект поставки | 同梱されているもの | 구성품 | Isi kemasan | 供货范围 | 供货範圍

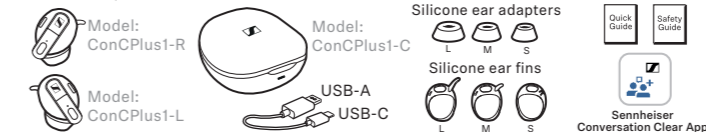

Lataaminen USB-virtalähteellä tai langattomalla latauslaitteella* | Για τη φόρτιση να χρησιμοποιείτε πηγή ρεύματος USB ή ασύρματο φορτιστή* | Ładowanie ze źródła zasilania USB lub za pomocą bezprzewodowej ładowarki* | Bir USB akım kaynağı veya kablolu şarj ağıtı* ile şarj etme | Зарядка с помощью USB-устройств или беспроводного зарядного устройства* | USB電源またはワイヤレス充電装置*を用いて充電する | USB 전원 또는 무선 충전기로 충전* | Mengisi daya dengan sumber daya USB atau pengisi daya tanpa kabel* | 使用USB电源或无线充电器*充电 | 使用USB电源或無線充電器*充電

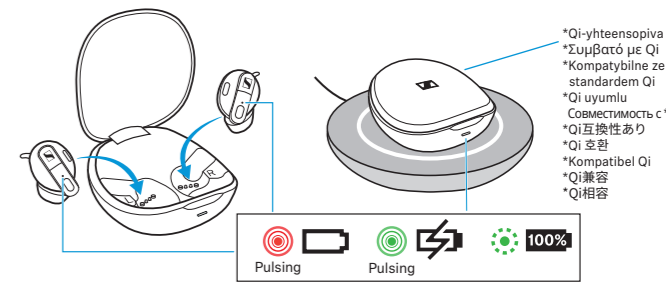




EN Welcome
 DE Willkommen
 FR Bienvenue
 ES Bienvenidos
 PT Bem-vindo
 NL Welkom
 IT Benvenuto
 DA Velkommen
 SV Välkommen

Quick Guide | Kurzanleitung | Guide rapide | Instrucciones resumidas | Guia rápido | Beknopte handleiding | Guida rapida | Kort vejledning | Snabbguide


Model: ConCPlus1, ConCPlus1-R, ConCPlus1-L, ConCPlus1-C

ConC 400


1. Waking up and charging the rechargeable batteries | Akkus aufwecken und laden | Réveiller et charger les batteries | Despertar y cargar las pilas recargables | Ativar e carregar as pilhas recarregáveis | De accu's plaatsen en opladen | Attivazione e caricamento delle batterie ricaricabili | Vækning og opladning af batterier | Väcka och ladda batterierna

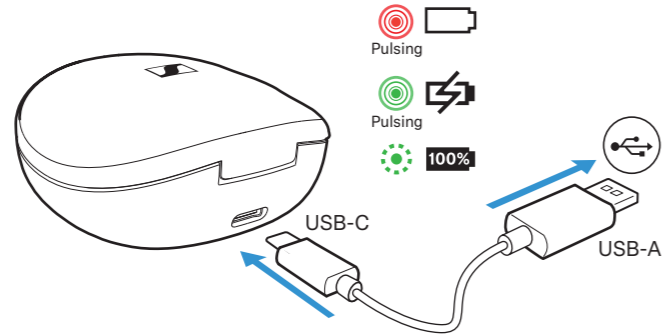


2. Starting the Bluetooth® pairing | Bluetooth®-Kopplung starten | Démarrer l'appairage Bluetooth® | Iniciar la sincronización Bluetooth® | Iniciar o emparelhamento Bluetooth® | Bluetooth®-koppeling starten | Avvio dell'accoppiamento Bluetooth® | Start af Bluetooth®-kobling | Starta Bluetooth®-parkoppling

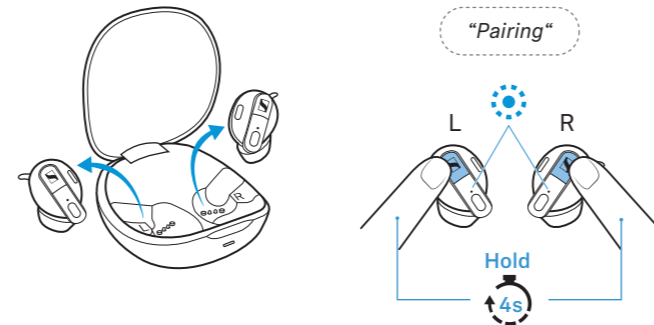

3. Establishing a connection | Verbindung herstellen | Établir une connexion | Establecer la conexión | Estabelecer a ligação | De verbinding tot stand brengen | Creazione di una connessione | Etablering af forbindelse | Upprätta en anslutning

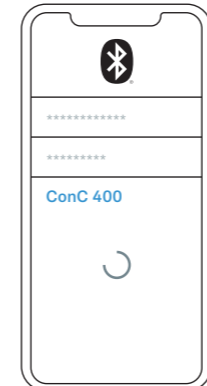

4. Selecting ear adapters and ear fins and inserting the earbuds into the ears | Ohradapter und Ohrfinnen wählen und Hörer in die Ohren einsetzen | Sélectionner les embouts d'oreille et les ailettes d'oreille et insérer les écouteurs dans les oreilles | Seleccionar los adaptadores para los oídos y las aletas y colocar los audífonos en los oídos | Escolher os adaptadores e alhetas auriculares e colocar os auscultadores nos ouvidos | Ooradapters en oorvinnen kiezen en oortelefoons in de oren inbrengen | Scelta dei gommini e delle alette auricolari e inserimento delle microcuffie nelle orecchie | Valg af øreadaptere og ørefinnet og isætning af øretelefoner i ørerne | Välja öronadaptrar och öronfenor och sätta in hörlurarna i öronen

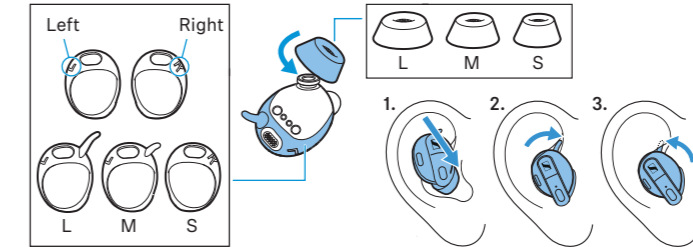

5. Downloading the app for customized settings of the earbuds | App herunterladen für individuelle Einstellungen der Ohrhörer | Télécharger l'appli pour les réglages personnalisés des écouteurs | Descargar la app para los ajustes individuales de los audífonos | Descarregar a app para definições individuais dos auriculares | App downloaden voor individuele instellingen van de oortelefoon | Download dell'app per impostazioni individuali delle microcuffie | Download af app til individuelle indstillinger af øretelefonerne | Ladda ner app för individuella inställningar av hörlurarna



www.sennheiser-hearing.com/conversation-clear-app

Instruction manuals and product support | Bedienungsanleitungen und Produktbetreuung | Notices d'emploi et support produit | Instrucciones de manejo y asistencia al producto | Manuais de instruções e assistência ao produto | Gebruiksaanwijzingen en product-support | Istruzioni per l'uso e assistenza sul prodotto | Betjeningsvejledninger og produktrådgivning | Bruksanvisningar och produktguide

www.sennheiser-hearing.com/conc-400



Sonova Consumer Hearing GmbH
 Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
 www.sennheiser-hearing.com
 029-3353-72/V1.00/2022-05

Controls (depending on active usage mode Relax, Communication or Stream) | Steuerungen (abhängig von den verwendeten Nutzungs-Modi Entspannen, Kommunizieren oder Streamen) | Commandes (selon le mode d'utilisation actif Détente, Communication ou Flux) |

	Relax	Communication	Stream
		Left	Right
Short press 1x		Volume -	Volume +
Hold 2s		—	Communication Mode
Tap 2x		Voice assistant	Play

Controles (en función de los modos de uso utilizados Relajación, Comunicación o Streaming) | Controlos (dependente dos modos de utilização utilizados Relaxar, Comunicar ou Streaming) | Besturingen (afhankelijk van de gebruikte gebruiksmodi Ontspannen, Communiceer of Streamen) | Controlli (in base alle modalità di utilizzo Relax, Comunicazione o Streaming) | Styrringer (afhængigt af de anvendte anvendelsesmodi afslapning, kommunikation eller streaming) | Styrningar (utifrån aktuellt använda användningslägen Koppla av, Kommunizera eller Streama)

	Relax	Communication	Stream
		Left	Right
Short press 1x		Volume -	Volume +
Hold 2s		Relax Mode	Clarity boost on/off
Tap 2x		Voice assistant	Play


ceren of Streamen) | Controlli (in base alle modalità di utilizzo Relax, Comunicazione o Streaming) | Styrringer (afhængigt af de anvendte anvendelsesmodi afslapning, kommunikation eller streaming) | Styrningar (utifrån aktuellt använda användningslägen Koppla av, Kommunizera eller Streama)

	Relax	Communication	Stream
		Left	Right
Short press 1x		Ambient balancing	Ambient balancing
Hold 2s		Relax Mode	Communication Mode
Tap 2x		Voice assistant	Play / Pause


Phone calls

Left or Right	Accept call	Reject call
	Short press 1x or Tap 2x	Hold 2s
Left or Right	End call	Ambient balancing
	Hold 2s or Tap 2x	Short press 1x

Package contents | Lieferumfang | Contenu | Volumen de suministro | Material fornecido | Omvang levering | In dotazione | Leveringsomfang | Leveransomfattning

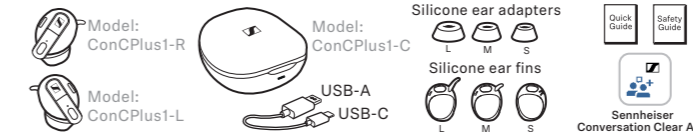

Charging with a USB power source or a wireless charger* | Laden mit einer USB-Stromquelle oder einem kabellosen Ladegerät* | Charger avec une source d'alimentation USB ou un chargeur sans fil* | Cargar con una fuente de corriente USB o con un cargador inalámbrico* | Carregar com uma fonte de corrente USB ou um carregador sem fios* | Opladen met een USB-stroombron of een draadloze oplader* | Caricamento con una fonte di energia USB o un caricabatterie wireless* | Opladning med en USB-strømkilde eller et trådløs oplader* | Laddning via en USB-strömkälla eller trådlös laddare*

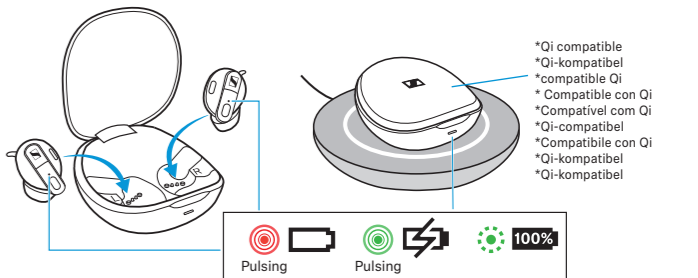

*Qi compatible
 *Qi-kompatibel
 *compatible Qi
 *Compatible with Qi
 *Qi-compatibel
 *Compatible with Qi
 *Qi-kompatibel
 *Qi-kompatibel



ConC 400

FI Tervetuloa
 EL Καλώς ορίσαστε
 PL Witamy
 TR Hoş geldiniz
 RU Добро пожаловать!
 JA ようこそ
 KO 환영
 ID Selamat datang
 ZH-HANS 欢迎
 ZH-HANT 歡迎

Pikaohje | Σύντομες οδηγίες | Krótka instrukcja obsługi | Kisa Kilavuz |
 Краткая инструкция | クイックガイド | 빠른 안내서 | Panduan ringkas |
 快速指南 | 快速指南

Model: ConCPlus1, ConCPlus1-R, ConCPlus1-L, ConCPlus1-C


Käyttöohjeet ja tuoteneuvonta | Οδηγίες λειτουργίας και υποστήριξη
 προϊόντος | Instrukcje obsługi i pomoc produktowa | Kullanım kılavuzları ve
 ürün desteği | Инструкции по эксплуатации и уход за изделием | 取扱
 説明書と製品サポート | 사용 설명서 및 제품 지원 | Petunjuk penggunaan dan
 dukungan produk | 使用说明书和产品支持 | 使用說明書和產品支援

www.sennheiser-hearing.com/conc-400




Sonova Consumer Hearing GmbH
 Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
 www.sennheiser-hearing.com
 029-3353-72/V1.00/2022-05


1. Akkujen herättäminen ja lataaminen | Επαναφορά και φόρτιση των μπαταριών | Uruchamianie i ładowanie akumulatorów | Pillerin uyandırılması ve şarj edilmesi | Пробуждение и зарядка аккумуляторов | 充電器を起動して充電する | 배터리 충전 및 웨이크업 | Aktifkan baterai dan isi dayanya | 喚醒電池并充电 | 喚醒電池並充電

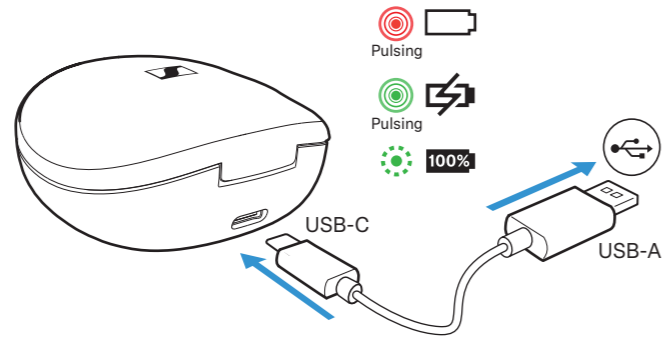


2. Bluetooth®-kytännän käynnistäminen | Έναρξη ζεύξης Bluetooth® | Rozpoczynanie parowania Bluetooth® | Bluetooth bağlantısının başlatılması | Установка соединения по Bluetooth® | Bluetooth®ペアリングを開始する | 블루투스 페어링 시작 | Mulai penyandingan Bluetooth® | 开始Bluetooth®配对 | 開始Bluetooth®配對

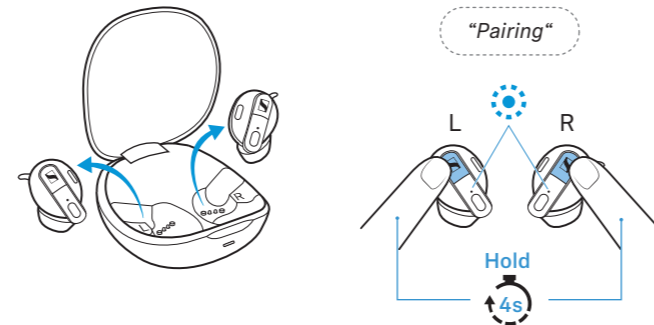

3. Yhteyden muodostaminen | Δημιουργία σύνδεσης | Nawiązywanie połączenia | Bağlantının kurulması | Установка соединения | 接続を確立する | 연결 구성 | Buat koneksi | 建立连接 | 建立连接

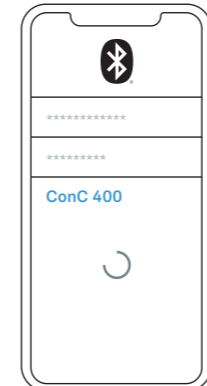

4. Korva-adapterien ja korvaevien valitseminen ja kuulokkeiden asettaminen korviin | Επιλογή μαξιλαριών αυτιού και πτερυγίων και τοποθέτηση των ακουστικών στα αυτιά | Wybór nakładki i wkładki dousznej i wkładanie słuchawek do uszu | Kulak adaptörleri ve kanatçıklarının seçilmesi, kulaklıkların kulaklara takılması | Выбор вкладыша и насадки. Вставка наушников | アダプターとイヤフィンを選択し、イヤフォンを耳に装着する | 이어 어댑터와 이어 핀을 선택하고 리시버를 귀에 삽입하십시오. | Memilih adaptor telinga serta sirip telinga, dan memasang headphone di telinga | 选择耳塞套和耳翼并将耳机放入耳道 | 選擇耳塞套和耳翼並將耳機放入耳道

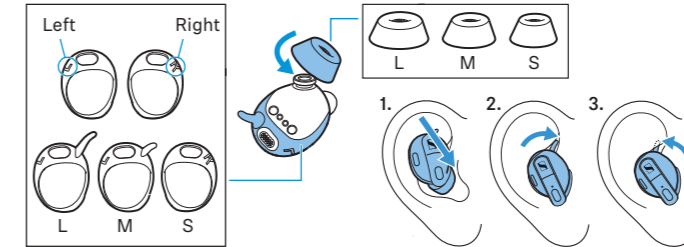

5. Sovelluksen lataaminen kuulokkeiden yksilöllisiä asetuksia varten | Λήψη εφαρμογής για εξατομικευμένες ρυθμίσεις των ακουστικών | Pobieranie aplikacji w celu dokonania indywidualnych ustawień słuchawek | Kulaklıkların özel ayarları için uygulamanın indirilmesi | Загрузка приложения для индивидуальных настроек |イヤフォンの個別設定のためのアプリをダウンロードする | 아이폰의 개별 설정을 위한 앱 다운로드 | Mengunduh aplikasi untuk pengaturan earphone masing-masing | 下载耳机的个性化设置应用程序 | 下载耳機的個人化設定應用程式



www.sennheiser-hearing.com/conversation-clear-app

Ohjaukset (riippuen käytettävästä käyttötilasta rentoutuminen, kommunikointi tai striimaus) | Χειρισμοί (αναλόγως τη λειτουργία χρήσης που χρησιμοποιείτε, Χαλάρωση, Επικοινωνία ή Μετάδοση μέσω ροής) | Sterowanie (w zależności od używanego trybu: relaks,

	Relax	Communication	Stream
		Left	Right
Short press 1x		Volume -	Volume +
Hold 2s		—	Communication Mode
Tap 2x		Voice assistant	Play

komunikacja lub odtwarzanie strumieniowe) | Kontroller (kullanılan Rahatlama, İletişim veya Ses Akışı modlarına bağlı olarak) | Управление (с учетом режима работы, связи и потоковых данных) | 制御 (使用されるモード(リラククス、コミュニケーション、ストリーム)に応じて) |

	Relax	Communication	Stream
		Left	Right
Short press 1x		Volume -	Volume +
Hold 2s		Relax Mode	Clarity boost on/off
Tap 2x		Voice assistant	Play


제어(휴식, 전화, 스트리밍 등 각 사용 모드에 따라 바뀜) | Kontrol (tergantung pada mode penggunaan yang dipakai, rileks, komunikasi, atau streaming) | 控制 (取决于使用模式: 放松、通讯或流媒体) | 控制 (取决于使用模式: 放鬆、通訊或串流媒體) |

	Relax	Communication	Stream
		Left	Right
Short press 1x		Ambient balancing	Ambient balancing
Hold 2s		Relax Mode	Communication Mode
Tap 2x		Voice assistant	Play / Pause


Phone calls

	Accept call	Reject call
Left or Right	Short press 1x	Hold 2s
	or Tap 2x	
	End call	Ambient balancing
	Hold 2s	Short press 1x
	or Tap 2x	

Toimitussisältö | Περιεχόμενα συσκευασίας | Zakres dostawy | Teslimat kapsamı | Комплект поставки | 同梱されているもの | 구성품 | Isi kemasan | 供货范围 | 供货範圍

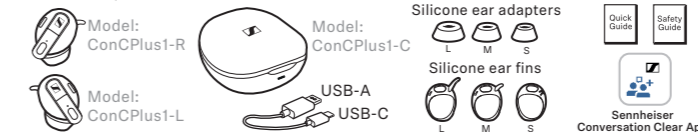

Lataaminen USB-virtalähteellä tai langattomalla latauslaitteella* | Για τη φόρτιση να χρησιμοποιείτε πηγή ρεύματος USB ή ασύρματο φορτιστή* | Ładowanie ze źródła zasilania USB lub za pomocą bezprzewodowej ładowarki* | Bir USB akım kaynağı veya kablolu şarj aygıtı* ile şarj etme | Зарядка с помощью USB-устройств или беспроводного зарядного устройства* | USB電源またはワイヤレス充電装置*を用いて充電する | USB 전원 또는 무선 충전기로 충전* | Mengisi daya dengan sumber daya USB atau pengisi daya tanpa kabel* | 使用USB电源或无线充电器*充电 | 使用USB电源或無線充電器*充電

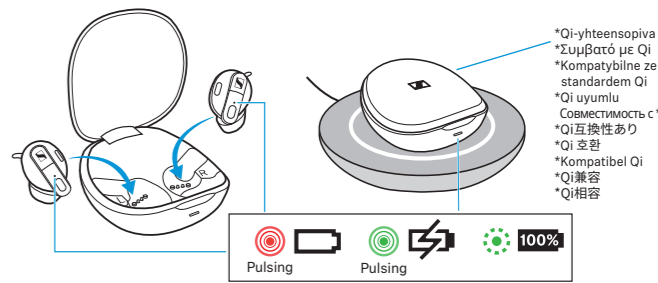

*Qi-yhteensopiva
 *Συμβατό με Qi
 *Kompatybilne ze standardem Qi
 *Qi uyumlu
 *Совместимость с Qi
 *Qi互換性あり
 *Qi 호환
 *Kompatibel Qi
 *Qi兼容
 *Qi相容